

Betriebsanleitung Handkraftmessgerät PCE-MMT I



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Sicherheitsinformationen	3
3	Spezifikationen	4
4	Systembeschreibung	5
4.1	Tastenfunktionen.....	5
4.2	Betriebssystem.....	7
4.3	Lieferumfang.....	7
5	Hauptmenü	7
5.1	Anwender.....	8
5.1.1	Speichern.....	8
5.1.2	Grenzwerte.....	11
5.1.3	Anzeige.....	12
5.1.4	Einheiten.....	13
5.1.5	System.....	13
5.2	Einstellungen.....	14
5.2.1	„Auto-0“.....	14
5.2.2	Messfrequenz.....	15
5.2.3	Digitalfilter.....	15
5.3	Werks-Setup.....	15
6	Messdaten speichern und übertragen	16
6.1	Spitzenwerte.....	16
6.2	Kurve.....	17
6.3	Beenden der Datenspeicherung.....	17
6.4	Datenübertragung im Messspeichermodus.....	17
6.5	Datenübertragung im Modus Data Streaming (DSI-Transmission).....	18
6.5.1	Übertragung der Messdaten zur Datenerfassungs-Software, die optional erhältlich ist:..	19
6.5.2	Übertragung der Messdaten zu einem bereits vorhandenen Terminalprogramm:.....	20
7	Kalibrierung	21
8	Akkubetriebszeit und Aufladung	21
9	SD-Speicherkarte	21
10	Ein- und Ausgänge	22
10.1	Mini-USB- Schnittstelle.....	22
10.2	Buchse.....	22
10.3	USB-Ladegerät.....	22
11	Inkremental Encoder (optional)	23
12	Fehlermeldungen	23
13	Reset-Funktion	23
14	Menü-Übersicht	24
15	Entsorgung	25
16	Kontakt	25

1 Einleitung

Dieses Benutzer-Handbuch wird von der PCE Deutschland GmbH ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Unsere Geräte entsprechen allen einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und tragen das CE –Zeichen. Die CE Konformitätsbescheinigung finden Sie als Anhang. Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die sich ebenfalls auf diesem Datenträger (CD) befinden und bitten um Beachtung. Die hier beschriebene Gewährleistungsfrist von 24 Monaten gilt nicht für die Akkus. Hierfür beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist 6 Monate ab dem Lieferdatum. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn eine Beschädigung durch

- einen Eingriff durch den Käufer, den Benutzer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät oder seine Software erfolgt
- unsachgemäße Behandlung; insbesondere mechanische Überlastung des eingebauten Sensors hervorgerufen wird
- unsachgemäße Bedienung, Aufbewahrung, höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse erfolgt.

Korrekturen und Änderungen dieses Handbuchs zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten können von der PCE Deutschland GmbH jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden.

2 Sicherheitsinformationen

Die PCE Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung technische Änderungen an den Geräten, seinem Zubehör und an der Software vorzunehmen. Eventuelle Änderungen werden in den dann herausgegebenen Benutzer- Handbüchern berücksichtigt.

Mit dem vorliegenden Messgerät können Zug- und Druckkräfte bis zum angegebenen maximalen Messbereich ermittelt werden. Eine unsachgemäße Anwendung kann zur Beschädigung des Sensors führen. Hierdurch sind die angezeigten und/oder übermittelten Messwerte nicht mehr aussagekräftig und nicht verwertbar.

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen.

Dieses Benutzer-Handbuch wird von der PCE Deutschland ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht.

Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die sich in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden lassen.


Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

3 Spezifikationen

Messgenauigkeit	$\leq 0,05\%$ v.E
Max. Messfrequenz	2000 Hz
Auflösung	± 50.000 digits
Spannungsversorgung	3 AA-NiMh Akkumulatoren
Speicher	2 GB SD-Speicherkarte
Visualisierung	Darstellung von Messkurven
Abmessungen (B x H x T)	75 x 35 x 170 mm
Gewicht	Ca. 600 g
Lager- und Verwendungstemperatur	+10 ... +42 °C

4 Systembeschreibung

4.1 Tastenfunktionen

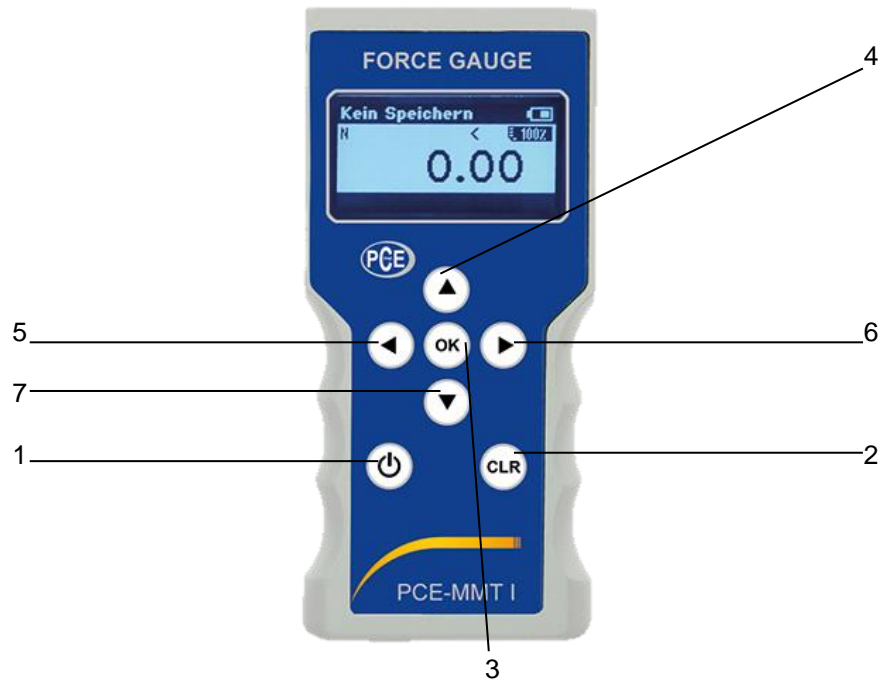

1	Power-Taste	Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste bitte für 2-3 Sekunden. Danach startet das Gerät automatisch im gewählten Messmodus.
2	Modus „Messen mit Spitzenwert“ : Löschen der Spitzenwerte	Oberer und unterer Spitzenwert werden gelöscht. Nicht gelöschte Spitzenwerte bleiben erhalten und werden erneut angezeigt, wenn der Spitzenwertmodus wieder aktiviert ist.
	Modus „Menü“	Verlassen vom Menü-Modus und vom Browse Fenster. Der Modus „Messen“ ist aktiv. Einstellungen werden gespeichert.
3	Zugang zu dem Modus „Menü“	
	Im Menü: Bestätigung der vorgenommen Eingaben	z.B. bei der Eingabe von Grenzwerten
4	Modus „Messen mit Spitzenwert“ Spitzenwert speichern	Übernahme des aktuellen Spitzenwertes in die offene Datei des Datenloggers, bis die im Menü eingestellte Anzahl von Messwerten erreicht worden ist.
	Modus „Menü“	Im Menü nach oben blättern Eingabe von Zahlenwerten: Erhöhung des angezeigten Wertes
	Modus „Datenübertragung“ / „Kurve Speichern“	Starten der Datenübertragung im kontinuierlichen Datenübertragungsmodus, oder der Kurvenaufzeichnung im Massenspeichermodus
5	Modus „Messen ohne Spitzenwert“	Nullsetzen der angezeigten Kraft
	Modus „Menü“	Vom Untermenü eine Menüebene höher Eingabe von Zahlenwerten: Verschieben des Cursors nach links
6	Modus „Messen mit Spitzenwert“ Umschalten: Spitzenwerte oben Spitzenwerte unten	Anzeige \uparrow im unteren Feld des Displays Anzeige \downarrow im unteren Feld des Displays
	Aktueller Messwert	Keine Anzeige im unteren Feld des Displays
7	Modus „Messen mit Spitzenwert“ Datei in Datenlogger schließen	Sofortiges beenden der Aufnahme von Messwerten, unabhängig davon, ob die
	Modus „Menü“	Im Menü nach unten blättern. Eingabe von Zahlenwerten: Verringerung des angezeigten Wertes
	Modus „Datenübertragung“ / „Kurve speichern“	Beenden der Datenübertragung im kontinuierlichen Datenübertragungsmodus, oder der Kurvenaufzeichnung im Massenspeichermodus.


4.2 Betriebssystem



Das Handkraftmessgerät besitzt einen eigenen Prozessor und arbeitet mit einem echtzeitfähigen Betriebssystem der neuesten Generation. Dieses System verarbeitet die Rohdaten der Messungen und gibt sie entsprechend an. Im Falle eingeschalteter Speicherfunktionen können MS EXCEL-kompatible CSV Dateien im integrierten Datenlogger gespeichert werden. Im Auslieferungszustand besitzt das Gerät eine SD-Speicherkarte mit 2GB Speicherkapazität.

4.3 Lieferumfang

1 x PCE-MMT I Handkraftmessgerät			
1 x Transportkoffer			
1 x Werks-Kalibrierzertifikat			
1 x CE-Zertifikat			
1 x 2 GB SD-Speicherkarte			
1 x USB-Netzteil			
1 x Haken			
1 x Druckstück			
2 x Verlängerung			
1 x USB-Kabel			
1	x	Software	CD
1 x Bedienungsanleitung			

5 Hauptmenü

Betätigen Sie , um in die Menüauswahl zu gelangen. Sie finden nun die Menüpunkte „Anwender“, „Einstellungen“ und „Werks-Setup“ vor.



Mit  können Sie zwischen den angezeigten Menüpunkten wechseln und mit  wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus.

Der Menüpunkt „Anwender“ umfasst den von Ihnen zum Messen benötigten Modus. Unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ können Sie erweiterte Einstellungen vornehmen. Der Menüpunkt „Werks-Setup“ macht es möglich die Werkseinstellungen wiederherzustellen oder in den Kalibriermodus zu gelangen. Dieser Bereich ist jedoch passwortgeschützt und kann nur durch unseren Service erreicht werden.

5.1 Anwender

Hier sind Sie im Benutzermodus. Das Menü strukturiert sich wie folgt:

- **Speichern**
- **Grenzen**
- **Anzeige**
- **Einheiten**
- **TEDs**
- **Kalibrierungs Nr.**
- **System**

Mit  können Sie zwischen den angezeigten Menüpunkten wechseln und mit  wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus.

5.1.1 Speichern



Hier können Sie den Speicher konfigurieren, löschen oder durchsehen. Das Menü ist folgendermaßen strukturiert:

- **Funktion**
- **Anzahl wählen**
- **Zeit Kurve**
- **Löschen**
- **Browse**

5.1.1.1 Funktion

Das Menü gliedert sich wie folgt:

- **kein Speichern**
- **Spitzenwert oben / unten**
- **Kurve speichern**




Mit  können Sie zwischen den angezeigten Menüpunkten wechseln und mit  wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus.

Speicher abstellen („kein Speichern“)

Bei Betätigung dieser Taste werden keine Messwerte gespeichert

Speicherung des oberen und des unteren Spitzenwertes („Spitzenwert oben/unten“)

Wenn Sie hier die  drücken, wird die Speicherfunktion der Spitzenwerte aktiviert.

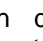Zunächst wird der obere Spitzenwert angezeigt. Im Display erscheint unten . Mit  wird die Anzeige des gespeicherten Wertes umgeschaltet. Es folgt der untere Spitzenwert, im Display erscheint . Der aktuelle Messwert wird in diesem Betriebsmodus zusätzlich im unteren Bereich des Displays (in kleinerer Darstellung) angezeigt


Mit  wird die Anzeige erneut umgeschaltet. Dann wird wieder nur der aktuelle Messwert angezeigt.

Hinweis: Die gespeicherten Spitzenwerte bleiben so lange erhalten, bis die **Clear-Taste** (CLR, Taste 2) betätigt wird. Nicht gelöschte Spitzenwerte bleiben erhalten und werden erneut angezeigt, wenn die Spitzenwertmessung aktiviert wird. Sie werden nur durch höhere Werte überschrieben.


Kurvenspeicherung („Kurve“)

Mit Betätigung  wird die Funktion „**Kurvenspeicherung**“ aktiviert.

5.1.1.2 Anzahl der Spitzenwerte festlegen („Anzahl wählen“)

Diese Funktion ermöglicht es, die Anzahl der Spitzenwerte festzulegen, die in der gleichen Datei gespeichert werden sollen. Mit Betätigung  (Taste 6) öffnet sich ein Fenster, in dem die Anzahl der abzuspeichernden Spitzenwerte festgelegt werden kann. Die Werkseinstellung ist 10.





5.1.1.3 Kurvenaufzeichnungsdauer („Zeit Kurve“)

Mit der Betätigung  wird die Funktion „Zeit Kurve“ aktiviert. Diese Funktion erlaubt es, die Aufzeichnungsdauer (1 bis 600 s) einer Kurve festzulegen. Nach dem Betätigen öffnet sich das Fenster „Sekunden“, in dem die Zeit eingegeben werden muss.




Hinweis: Die maximale Aufzeichnungsdauer der Aufnahme ist durch die Größe der Messfrequenz begrenzt siehe dazu Tabelle 5.2


5.1.1.4 „Löschen“


In den Menüebenen „Löschen Spitzenwert“, „Löschen Kurven“ und „Löschen Alles“ können gespeicherte Dateien gelöscht werden.

Mit der Betätigung  (Taste 6) auf der gewünschten Funktion öffnet sich ein Auswahlfenster. Die Optionen sind „OK“ und „Exit“. Die Auswahl der gewünschten Option erfolgt über  . Bestätigen Sie die Auswahl mit .

5.1.1.5 Anzeigen der gespeicherten Dateien („Browse“)

Mit der Betätigung  wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem Fenster werden die auf dem Messgerät gespeicherten Kurven- und Spitzenwertdateien tabellarisch angezeigt. Dargestellt wird der Name, welchen die Datei belegt. Navigiert wird in dieser Darstellung mit  .


Durch die Betätigung  auf einer selektierten Datei haben Sie die Möglichkeit, sich Dateiinformationen wie Speicherzeit und Größe anzeigen zu lassen. Außerdem ist es möglich, die selektierte Datei einzeln zu löschen.

Um dieses Fenster zu verlassen, betätigen Sie die .

5.1.2.2 Zeitlimit für Datenübertragung

Im Menüpunkt „**DSI time limit activation**“ können Sie ein Zeitlimit für das Stoppen der Datenübertragung aktivieren.

Der Menüpunkt „**DSI time limit(sec)**“ ermöglicht es Ihnen, eine Zeit einzugeben, die darstellt, wie lange Daten über die USB-Schnittstelle übertragen werden. Die Eingabe erfolgt in Sekunden (0 ... 9999 s). Wird die Zeit auf 0 gesetzt, ist diese Funktion abgeschaltet.

Hinweis: Die Grenzwertausgänge des Geräts werden bei Überschreitungen des Zeitlimits geschaltet. Ein angeschlossener Prüfstander wird dadurch gestoppt. Um die Ausgänge wieder zurückzusetzen, drücken Sie entweder die  oder starten Sie eine neue Datenübertragung.

*Wenn die Funktion „**Kurve speichern**“ aktiviert ist, ist diese Einstellung nicht wirksam. Stattdessen wird die Zeitgrenze aus „Kurvendauer“ berücksichtigt.*

5.1.3 Anzeige

Sie können das Display folgendermaßen an Ihre Anforderungen anpassen:

„Anzeige rotieren“

Nach Betätigen  können Sie mit  die Anzeige im Display um **180°** drehen. Bestätigen Sie die Auswahl mit .

„Hintergrund“

Nach Betätigen  können Sie mit  zwischen **Normal** und **Invertierter** Anzeige wählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit .



„Hintergrundlicht“

Nach Betätigen  kann die Hintergrundbeleuchtung mit den  stufenlos geregelt werden. Bestätigen Sie die Auswahl mit .

„Kontrast“

Nach Betätigen  kann der Kontrast mit  stufenlos geregelt werden. Bestätigen Sie die Auswahl mit .


5.1.4 Einheiten


Mit  aktivieren Sie die Auswahl der Einheiten (N, kN, kg, usw.)
Betätigen Sie die Auswahl mit .

5.1.5 System

5.1.5.1 Datum / Zeit

Hier können Sie Datum und Uhrzeit einstellen. Das ist nur beim Wechsel des Akkus notwendig, da Datum und Uhrzeit werksseitig vorgenommen wurden.




Mit  können Sie Datum und Uhrzeit einstellen. Die Eingabe wird bei erstmaligem Betätigen einer der beiden Tasten aktiviert.

Bestätigen Sie die Auswahl mit .

5.1.5.2 Sprache

Für die Anzeige können die folgenden Sprachen eingestellt werden:



- Deutsch
- Englisch
- Spanisch
- Französisch
- Italienisch

Wählen Sie mit  die gewünschte Sprache und bestätigen Sie mit . Die Sprache wechselt sofort nach Betätigung von .

5.1.5.3 Automatische Abschaltfunktion

Sie können verschiedene Möglichkeiten auswählen:



- **AUS** (automatisches Ausschalten ist deaktiviert)
- **1** (automatisches Ausschalten nach 1 Minute)
- **2** (automatisches Ausschalten nach 2 Minuten)
- **5** (automatisches Ausschalten nach 5 Minuten, Werkseinstellung)
- **10** (automatisches Ausschalten nach 10 Minuten)

Mit  können Sie eine Option auswählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit .

5.1.5.4 USB



In diesem Menü wird die Art der Messdatenübertragung ausgewählt. Zur Auswahl stehen:

- **Massenspeicher (Werkseinstellung)** PCE-MMT I als Massenspeicher
- **kontin.** PCE-MMT I überträgt kontinuierlich


Mit  können Sie die gewünschte Übertragungsart wählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit .

5.2 Einstellungen

- | | |
|----------------|------------------------------|
| „Auto-0-“ | Werkseinstellungen -> Ein |
| „Messfrequenz“ | Werkseinstellungen -> 100 Hz |
| „AD/DA Filter“ | Werkseinstellungen -> Aus |

Mit  können Sie das gewünschte Untermenü auswählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit .

5.2.1 „Auto-0“

Mit  gelangen Sie in die Funktion für das automatische Nullsetzen beim Einschalten.



Durch Betätigung von  bestätigen Sie die Auswahl.

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die Anzeige beim Einschalten automatisch auf Null gesetzt; unabhängig von der vorhandenen Last.

5.2.2 Messfrequenz

Es liegen folgende Einstellungsmöglichkeiten vor Ihnen:



- **2000 Hz** (Maximalwert)
- **1000 Hz**
- **500 Hz**
- **400 Hz**
- **250 Hz**
- **200 Hz**
- **160 Hz**
- **100 Hz** (Werkseinstellung)
- **50 Hz**

Mit  können Sie die Abtastrate des Analog/Digital-Wandlers einstellen. Bestätigen Sie die Auswahl mit .

5.2.3 Digitalfilter

Es liegen folgende Einstellungsmöglichkeiten vor Ihnen:

- **AUS** (kein Filter; Werkseinstellung)
- **F 1** (kleinste Filterstufe)
- **F 2**
- **F 3** (mittlere Filterstufe)
- **F 4**
- **F 5** (größte Filterstufe)

Mit  können Sie den gewünschten Filter auswählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit .

Technischer Hinweis zur Filterfunktion:

FIR-Filter (Finite Impulse Response) sind rückkopplungsfreie, phasenlineare Digitalfilter mit endlicher Impulsantwort, deren gefilterte Werte $y(n)$ aus einer bestimmten, gerade zurückliegenden Vergangenheit des Eingangssignals x berechnet werden. Beim FIR-Filter bezieht sich die Berechnung des y -Wertes auf die endliche Vergangenheit.

Die Funktion eines FIR-Filters kann beispielhaft mit der Bildung eines gleitend Mittelwertes verglichen werden. Dabei wird die Summe aus "n" aufeinander folgenden Werte gebildet und diese durch "n" dividiert. Danach wird die Gruppe der n-Werte fortlaufend jeweils um einen Takt weitergeschoben und jedes Mal wird erneut der Mittelwert gebildet. Dabei bezeichnet man die maximale Anzahl an vergangenen Werten die bei der Berechnung berücksichtigt werden als Ordnung. Je höher die Ordnung, desto besser die Eigenschaften des Filters, desto höher aber auch der Rechenaufwand. Für das Anzeigegerät bedeutet dies, je höher die Ordnung des ausgewählten Filters, desto mehr Werte werden bei der Mittelwertbildung berücksichtigt.

5.3 Werks-Setup

Hinweis: Dieses Menü ist passwortgeschützt und kann nur von unseren Servicetechnikern genutzt werden. Es dient zur Konfiguration und Kalibrierung des Messgeräts.

6 Messdaten speichern und übertragen

6.1 Spitzenwerte

Wenn die Funktion Spitzenwerte aktiviert ist, speichert das Gerät die voreingestellte Anzahl an Spitzenwerten in eine EXCEL kompatible Datei mit der Endung *.csv ab. Das Format heißt "Microsoft Office Excel Comma Separated Values File".

Wenn die Anzahl der Spitzenwerte, die im Menüpunkt „Anzahl“ definiert wurde, erreicht wird, schließt sich die Datei automatisch. Der Dateiname für Spitzenwertdateien lautet Peakxyz.csv wobei xyz für eine fortlaufende Zahl, beginnend mit 001 steht.

Der ermittelte Spitzenwert erscheint in der Anzeige. In eckigen Klammern wird die verbleibende Anzahl der Speicherplätze der aktuellen Datei angezeigt.

Der Spitzenwert wird bei Betätigung von  gespeichert.


Hinweis: Die Datei wird in diesem Fall selbst dann geschlossen, wenn die voreingestellte Anzahl von Spitzenwerten noch nicht erreicht ist!

Das Speichern wird dadurch beendet, dass Sie den Menüpunkt „kein Speichern“ auswählen oder dadurch, dass der Speicherplatz auf der SD-Speicherkarte belegt ist.

6.2 Kurve

Diese Funktion ermöglicht die Speicherung der ermittelten Messwerte in einer Datei. Die Dauer der Aufnahme ist einstellbar und durch die Größe der Messfrequenz (**siehe Kap. 4.2.2**) begrenzt.

Gewählte Messfrequenz (Hz)	Max. Aufzeichnungsdauer (s)
2000	40
1000	80
500	150
400	200
250	300
200	400
160	500
100	600
50	600

Mit Betätigung von  beginnt die Aufzeichnung der Daten in die *.csv Datei auf der Speicherkarte oder bei aktiviertem Data Streaming die Übertragung der Daten an den angeschlossenen Computer.

Die Aufnahme wird mit Betätigung von  oder bei Überschreitung eines voreingestellten Grenzwertes (**siehe 5.1.2**) beendet.

Bei Ablauf der voreingestellten Zeit endet die Aufnahme automatisch. Die Datei wird geschlossen und eine neue Datei geöffnet, bzw. wird die Übertragung an den Computer beendet, wenn Data Streaming aktiviert ist.

Der Dateiname für auf der SD-Speicherkarte abgelegte Kurven lautet **Curvxyz.csv**, wobei **xyz** für eine fortlaufende Zahl, beginnend mit **001**, steht und eine Excel kompatible Datei mit der Endung *.csv ist.

6.3 Beenden der Datenspeicherung


Das Speichern wird beendet durch Auswahl des Menüpunktes „kein Speichern“, oder wenn der Speicher auf der SD-Speicherkarte komplett belegt ist. Die Messdatenübertragung durch Data Streaming bleibt weiterhin aktiv.

6.4 Datenübertragung im Messspeichermodus

Die Datenübertragung erfolgt über die USB-Schnittstelle. Die Werkseinstellung des Handmessgerätes ermöglicht die Benutzung als Massenspeicher. Das heißt bei der ersten Verbindung zu einem Computer wird ein Massenspeicher Treiber, ähnlich wie für einen USB Stick automatisch installiert. Danach sind die abgespeicherten Messdaten einfach über den Windows-Explorer kopierbar. Alternativ können die Dateien direkt mit Excel geöffnet und weiterverarbeitet werden.

6.5 Datenübertragung im Modus Data Streaming (DSI-Transmission)

Wenn der Modus Data Streaming aktiviert ist (**siehe 6.5**), können Messdaten kontinuierlich an einen Computer gesendet werden.

Mit Betätigung von  beginnt die Übertragung der Daten an den angeschlossenen Computer.

Die Datenübertragung wird mit Betätigung von  oder bei Überschreiten eines voreingestellten Grenzwertes beendet.

Um diese Funktion auf dem PC nutzen zu können, ist es erforderlich, den Virtual COM Port Treiber von der mitgelieferten CD zu installieren. Legen Sie dazu die CD in das Laufwerk und ignorieren Sie eventuelle Autostart Aktionen von Windows. Schalten Sie das Messgerät ein, aktivieren Sie den Modus Data Streaming und verbinden Sie das Messgerät mit einem freien USB-Steckplatz. Der Windows Hardware-Assistent wird erscheinen. Folgen Sie den Anweisungen zur automatischen Installation. (Eine ausführliche Treiberinstallationsanleitung befindet sich auf der CD)

Wenn der Treiber installiert ist, erschließen sich Ihnen zwei Möglichkeiten:

6.5.1 Übertragung der Messdaten zur Datenerfassungs-Software, die optional erhältlich ist:

Um die Software zu nutzen, starten Sie bitte die Setup.exe Datei von der optionalen CD und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Ein ausführliches Benutzerhandbuch ist auf der CD enthalten.

Die Software bietet folgende Funktionen:

Anzeige der übertragenen Messdaten als Wert und als Messdiagramm

Abspeichern der Messdaten als Excel kompatible *.csv-Datei

Erstellen eines PDF-Prüfberichts inklusive Diagramm, Maximal-, Minimal- und Mittelwert


Bestimmung der Steigung

Einbindung eines Firmenlogos (.jpg oder .bmp)

Frei verfügbare Dokumentations- und Notizenfelder

Bei Verwendung von PCE-MMT E und Weg-Encoder, Umschaltung zwischen Kraft-Zeit

Und Kraft-Weg Kurve.

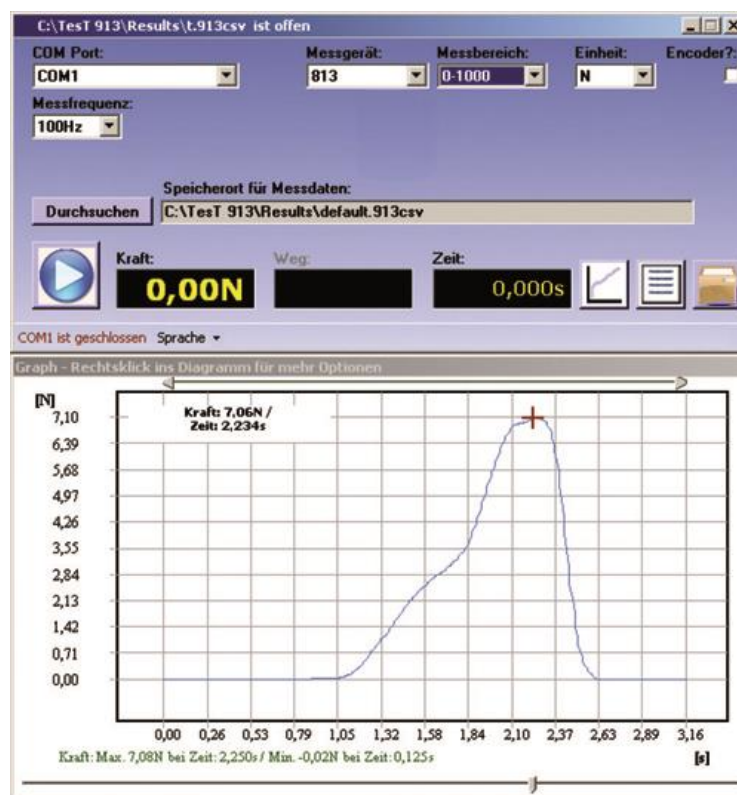

Hinweis: Achten Sie bitte immer darauf zuerst das Gerät einzuschalten, bevor es mit dem gestarteten Computer verbunden wird. Sollte die Datenübertragung einmal nicht funktionieren. Beenden Sie bitte die Software. Stellen Sie sicher das alle Kabelverbindungen ordnungsgemäß gesteckt sind. Stellen Sie sicher, dass der Prüfstander oder externe Geräte eingeschaltet sind und schalten Sie dann das Messgerät ein. Starten Sie die Software erneut und der Datentransfer ist wieder hergestellt.

6.5.2 Übertragung der Messdaten zu einem bereits vorhandenen Terminalprogramm:

Um die Daten in eine von Ihnen bevorzugte Anwendung zu übertragen, folgen Sie bitte den Anweisungen, die Ihnen von dieser Software vorliegen.

Die Messdatenübertragung erfolgt mit folgender Formatierung

Kraft EOT

Wenn die Anzeige eines Inkrementellen Weg-Encoders aktiviert ist (optional) und dieser angeschlossen ist, erfolgt die Messdatenübertragung mit folgender Formatierung

Kraft;Weg EOT

Kraft: 7 ASCII Zeichen, von 30h bis 39h, möglicher Dezimalpunkt (2Eh). Anstelle von nicht signifikanten Nullen werden Leerstellen (20h) übertragen

Weg: 7 ASCII Zeichen, von 30h bis 39h, möglicher Dezimalpunkt (2Eh). Anstelle von nicht signifikanten Nullen werden Leerstellen (20h) übertragen

EOT: 04h

Hinweis: Wie die Daten übertragen werden hängt von der am Gerät eingestellten Messfrequenz ab. Bis zu einer eingestellten Messfrequenz von 100Hz werden die Daten direkt und kontinuierlich mit Beginn der Messung übertragen. Wenn die Messfrequenz über 100Hz liegt, werden die Messdaten aufgrund einer Limitierung der USB-Schnittstelle erst auf dem Messgerät zwischengespeichert und am Ende der Messung übertragen.

7 Kalibrierung

Die Kalibrierung der Anzeigergeräte und Sensoren erfolgt in unserem Prüflabor unter Verwendung rückführbar kalibrierter Gewichte (bis 1000 N) bzw. von rückführbar kalibrierten Referenz-Kraftmessgeräten (ab 1000 N).

Es wird empfohlen, jährlich eine Rekalibrierung durchführen und zertifizieren zu lassen. PCE Deutschland erstellt dazu ein Werkszeugnis mit Angabe der rückführbaren Referenz-Messmittel.

8 Akkubetriebszeit und Aufladung

In dem Fach auf der Rückseite des Messgerätes befinden sich drei umweltfreundliche AA-Akkumulatoren, welche vor der Auslieferung voll aufgeladen werden. Zum Laden der Akkumulatoren sollte das im Lieferumfang enthaltene USB-Netzteil verwendet werden. Bitte arbeiten Sie mehrfach bis zur vollständigen Entladung der Akkumulatoren und laden sie erst danach wieder auf. Bei dauerhaftem Einsatz, z.B. in einem kleinen Prüfstand, nehmen Sie das Ladegerät mindestens einmal pro Woche während der Arbeitszeit ab und warten bis zur vollständigen Entladung der Akkumulatoren. Bitte laden Sie das Gerät erst danach wieder auf. Die normale Arbeitszeit mit einem vollgeladenen Akkusatz beträgt ca. 10 Stunden. Die notwendige Ladezeit beträgt ca. 3 – 4 Stunden. Der aktuelle Ladezustand der Akkumulatoren wird jederzeit in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt. Sollten die Akkumulatoren Ihre maximale Lebensdauer erreicht haben und nicht mehr ihre volle Leistung entfalten, so können Standard AA-Akkumulatoren oder im Notfall 1,5V AA Batterien verwendet werden. Bitte beachten sie dabei, dass die Arbeitszeit mit Standard Batterien eingeschränkt ist. Beim Anschluss des mitgelieferten Ladegerätes erkennen Sie den Ladezustand am sich bewegendes Batteriesymbol in der rechten oberen Ecke der Anzeige. Bitte beachten sie, dass neue Akkus ihre volle Kapazität erst nach einigen Lade-/ Entladezyklen erreichen. Empfehlenswert ist das Handmessgerät nach jedem Gebrauch oder täglich an das Ladegerät anzuschließen. Hinweis: Es ist sinnvoll, die Akkus nach längerem Gebrauch so weit wie möglich zu entladen und wieder vollständig aufzuladen.

9 SD-Speicherkarte

Im Lieferumfang befindet sich eine Speicherkarte mit einer Kapazität von 2 GB. Auf ihr speichert das Messgerät anfallende Spitzenwert- und Kurvendateien ab. Alternativ zur Datenübertragung über das USB-Kabel kann diese Karte durch leichten Druck auf aus dem auf der rechten Seite befindlichen Schlitz entnommen werden. Im Anschluss kann sie dann mithilfe eines SD-Kartenlesegerätes an jedem Computer ausgelesen werden. SD-Speicherkarten bis zu 4 GB werden unterstützt.

10 Ein- und Ausgänge

10.1 Mini-USB- Schnittstelle

Das USB-Datenkabel ist im Lieferumfang enthalten.

10.2 Buchse


Der Analogausgang ist proportional zum Messwert. Dieser hat einen max. Wert von ± 2 V DC, entsprechend des Nennmessbereichs vom Handmessgerät.

Eine eventuelle Kalibrierung des Analogausgangs an zwei Messpunkten ist optional bestellbar.

Hinweis: Die Nullpunkteinstellung am Anzeigegerät wird im unbelasteten Zustand des Kraftaufnehmers durchgeführt. Die Montage einer Kraftleitungsvorrichtung, zum Beispiel eines Keilspannzeuges an das Kraftleitungsgewinde führt zu einer Vorbelastung und damit zu einem abweichenden Spannungssignal am Analogausgang.

Option: Ausgangskabel oder Gegenstecker für eine Buchse

- 1) Out 1 – oberer Grenzwert
- 2) Out 2 – unterer Grenzwert
- 3) GND Out
- 4) Analog ± 2 V
- 5) GND analog
- 6) Encoder A (optional)
- 7) Encoder B (optional)

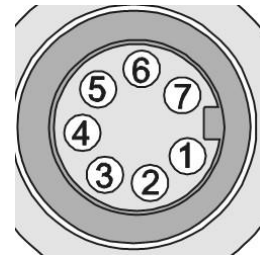

10.3 USB-Ladegerät

Das USB-Ladegerät ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

11 Inkremental Encoder (optional)

Bei der Verwendung vom PCE-MMT I in einer unserer Prüfstände kann der Verfahrweg der Maschine über einen als Option erhältlichen Inkremental Encoder Eingang an der 12-poligen Messzellenbuchse eingelesen werden und zusammen mit der Kraft im Display angezeigt werden.

12 Fehlermeldungen

Bei einer Fehlbedienung, die zu einer Überlastung des eingebauten Kraftaufnehmers führt, werden 2 Fehlermeldungen aktiviert:

- Bei einer Überlastung um ca. 15 % der Nennlast erscheint anstelle der Kraftanzeige die Schriftzeile „**Overload**“
Ein mechanischer Überlastschutz greift bei etwa 125 % der Nennlast. Wird die Überlastung rechtzeitig zurückgenommen, erlischt diese Anzeige wieder und das Handmessgerät kann normal weiterverwendet werden.
- Durch extreme Krafteinwirkung, z.B. wenn das Messgerät auf die Krafteinleitungsachse herunterfällt, kann der mechanische Überlastschutz überwunden und der Sensor mechanisch verformt werden. Dadurch wird der Nullpunkt des Sensors dauerhaft verschoben. Ist diese Nullpunktverschiebung permanent größer als 20 % der Nennlast, erscheint im unteren Bereich des Displays zusätzlich die Schriftzeile: „**Overloaded**“
Diese Schriftzeile kann nur nach erfolgter Reparatur, ggf. Sensor-Austausch im Werk zurückgesetzt werden.

13 Reset-Funktion

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich das Gerät durch eine Störung nicht mehr bedienen lässt, kann die Systemsoftware durch Betätigung der Reset-Taste (an der rechten oberen Seite) mittels eines kleinen runden Gegenstandes (z.B. einer Büroklammer) zurückgesetzt werden. Alle vorgenommenen Einstellungen bleiben dabei erhalten.

14 Menü-Übersicht

1. Ebene	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene
Anwender	11 Speicher	1112 Funktion	1111 Kein Speichern 1112 Spitzenwerte +/- 1113 Kurve speichern 1121 Wert Eingabe
		112 Anzahl Spitzenwerte	1121 Wert Eingabe
		113 Zeit Kurve	1131 Wert Eingabe
		114 Löschen	1141 Löschen Spitzenwert 1142 Löschen Kurven 1143 Löschen Alles
		115 Browse	
	12 Grenzwert	121 Oberer	1211 Sollwert->Eingabe 1212 Modus->Vorzeichen/ Absolut
		122 Unterer	1221 Sollwert->Eingabe 1222 Modus->Vorzeichen/ Absolut
	13 Anzeige	131 Rotieren	1311 0° / 180°
		132 Invertieren	1321 Normal/Invertiert
		133 Hintergrundlicht	1331 Regeln Aus ... Max.
		134 Kontrast	1341 Regeln Aus ... Max.
	14 Einheiten	141 N	
		142 kN	
		143 MN	
		144 g	
		145 kg	
		146 t	
		147 lb	
	15 System	151 Datum/Zeit	
		152 Sprache	1521 D / GB / Sp / Fr / I
		153 Automatisch Aus	1531 Aus/1/2/5/10min
		154 USB	1541 Massenspeicher 1542 kontinuierlich
Einstellungen	21 Auto-0-	211 Ein/Aus	
	22 Messfrequenz	221 Auswahl	2221 2000/1000/500/400/250/200/160/100/50 Hz
	23 AD/DA-Filter	231 Aus	
		232 F1	
		233 F2	
		234 F3	
		235 F4	
		236 F5	

15 Entsorgung

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

16 Kontakt

Bei Fragen zu unserem Produktsortiment oder dem Messgerät kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

Postalisch:

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede

Telefonisch:

Support: 02903 976 99 8901
Verkauf: 02903 976 99 8303

Eine Übersicht unserer Messtechnik finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm>

Eine Übersicht unserer Messgeräte finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm>

Eine Übersicht unserer Waagen finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm>

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE
und RoHS zugelassen.